

Pás s bodovou turmalínovou vrstvou je zdravotnický prostředek a je určen pro použití ve zdravotně-preventivních zařízeních i v domácnostech. Přináší úlevu od osteochondrózy bederní a křížové páteře, pomáhá k regeneraci natažených svalů, zlepšuje metabolismus, zrychluje buněčný metabolismus, odstraňuje svalové napětí, stres a únavu, působí regeneračně na celý organismus.

Velikost pásu: univerzální. **Pás je určený pro 5000 hodin použití.**

Návod k použití: přiložte na záda vlhký obklad a přes něj připevněte pás. Po 15-20 minutách ucítíte teplo. Doba užívání je individuální podle pocitu, neměla by však překročit 2 hodiny denně.

Varování: v místech, na nichž byl pás připevněný, se po aplikaci může na kůži objevit zarudnutí a mírně nepříjemný pocit. Jedná se o běžnou reakci, která vymizí během 3-4 hodin po sejmutí pásu.

Kontraindikace: použití pomůcky se nedoporučuje v následujících případech: při zvýšené tělesné teplotě, při onkologických onemocněních, křečových žilách nebo poškození kůže v místech, která jsou vystavena působení pásu. Nedoporučuje se osobám, které mají v těle kovové implantáty.

Složení: Horní vrstva: nylon 80 %, polyuretan (Elastan / Spandex) 20 %; Spodní vrstva: polyester 100 %. Bodová vrstva: turmalín, aluminosilikát, železný prášek.

Datum výroby: viz obal. **Č. šarže:** viz obal

Výrobce: Tianjin Zhongjian Guokang Nano-Tech Co., Ltd. JinWei East Road, BeiChen District. TianJin (Inside Ao Xiang Yu Knitting Company., Ltd.), Čína.

Distributor a autorizovaný zástupce pro Evropskou unii: „ASTI Group“ LTD, Zārdū 5, Rīga, LV-1083, Lotyšsko, +371 27030599.